



NATURAL+™ Professional ist ein innovatives, etabliertes System der Zahnaufhellung für die Behandlung aller Typen intrinsischer und extrinsischer Flecken und Verfärbungen. Das sichtbare Aufhellungsergebnis erreicht bis zu acht Farbstufen (VITA Farbskala). Natural+™ überzeugt mit hoch ästhetischen und langanhaltenden Ergebnissen.

Das NATURAL+™ Professional Gel basiert auf stabilisiertem 33-prozentigem H₂O₂. Der Prozess der Sauerstofffreisetzung ist während des Bleachingvorgangs progressiv und nicht volatil. Diese spezifische Eigenschaft macht es möglich, dass die Wirksamkeit des Wirkstoffes über einen Zeitraum von 30 Minuten erhalten bleibt und somit ein erneutes Auftragen des Gels nicht erforderlich ist. Die kontinuierliche, langsame Freisetzung von radikalen Sauerstoffionen ermöglicht ein tieferes Eindringen des Sauerstoffes in das Dentin. Eine Dehydration wird so vermieden.

Dank der speziellen patentierten Formel erfolgt die Zahnaufhellung ökologisch, pH-neutral und nahezu schmerzfrei. Das Natural+™ Bleachinggel ist mit Kalium, Kalziumnitrat und Natriumfluorid angereichert, wodurch eine optimale Hydratation der Zähne während des gesamten Bleachingprozesses gewährleistet ist. Die Wirkung des Bleachinggels wird durch die Verwendung der Natural+™ LED-Lampe optimiert. Die NATURAL+™ Lampe zeichnet sich durch ihre Hochleistungs-LED-Technologie aus, die zwei unterschiedlichen Lichtspektren, rotes und blaues Licht, verwendet. Das Natural+™ Lampen-Set enthält einen Kopfhörer mit eingebautem Soundsystem, eine Steuerungseinheit mit Fernbedienung, die LED-Lampe sowie eine Schutzbrille. Dank des ergonomischen Designs hat der Kopfhörer einen hohen Tragekomfort und passt sich jeder Kopfform an. An der Kopfstütze ist ein Bügel zur Einhängung der LED-Lampe angebracht.

Weitere Informationen erhalten Sie unter:
www.bisico.de/produkt/natural-professional



Auswertung

Natural+™


Die natürliche Zahnaufhellung in der Praxis

Wie zufrieden sind Sie mit dem Handling/Anwendung?

a.) Gingivaschutz




b.) Bleachinggel

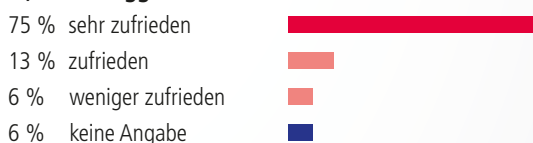


c.) Natural+ LED Lampe



Wie empfinden Sie den zeitlichen Aufwand im Vergleich zu den Ihnen bekannten Systemen?

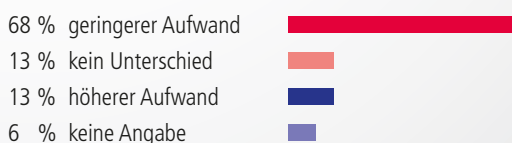

Wie beurteilen Sie das Bleaching-/Farbergebnis?

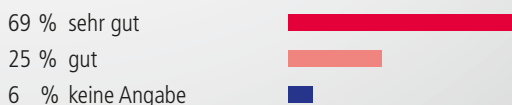

Würden Sie Natural+ in Ihrer Praxis anbieten?

